



Scheda Tecnica

Descrizione Articolo	ActiMaris® Sensitive – Soluzione di Irrigazione della Ferita
<p>Descrizione</p>  	<p>1. Profilo del prodotto La soluzione di irrigazione della ferita ActiMaris® Sensitive è composta di acqua con sale marino (1,2 %), NaOCl (0,04 %) e HOCl (0,004%), ed Ossigeno Attivo (¹O₂). La soluzione di irrigazione della ferita ActiMaris® Sensitive ha un effetto nascente quando interagisce con la mucosa, la pelle e la ferita. L'ipoclorito di Sodio ed il sale eliminano i patogeni tipici della ferita senza danneggiare il tessuto. È stato testato un effetto di decontaminazione positivo contro MRSA / VRE. L'effetto ossidativo dell'ossigeno singolo (1O₂) e la soluzione ipertonica di sale marino sono anche responsabili della neutralizzazione degli odori provenienti dalle ferite. Il pH alcalino della soluzione di irrigazione della ferita ActiMaris® Sensitive supporta il rilascio di ioni OH (come parte di un sistema redox naturalmente bilanciato) e inoltre, controlla il rilascio di ossigeno. Il sale marino contiene cloruro di sodio come ingrediente principale (NaCl = 98%) ed alogenuri al 2%. L'elevata salinità della soluzione per l'irrigazione delle ferite di ActiMaris® Sensitive a sua volta garantisce un effetto iperosmotico ottimale in modo che qualsiasi gonfiore della ferita si attenui rapidamente.</p> <p>2. Campi di applicazione La soluzione di irrigazione per ferite ActiMaris® Sensitive è adatta : Per la pulizia, l'umidificazione, la decontaminazione, la dissoluzione del biofilm, debridement fisiologico e del gonfiore, per creare un «microambiente» ottimale per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traumi meccanici acuti (lacerazioni cutanee, morsi, tagli e abrasioni, screpolature e contusioni) e ferite post-operatorie • Ferite croniche (ulcere da decubito, ulcere artero-venose, ulcere diabetiche) • Ferite necrotiche, maleodoranti e tumori ulceranti, anche con cavità • Traumi termici (ustioni dal 1° al 3° grado) • Accessi del catetere e tubi PEG e sistemi di drenaggio • Ulcere venose • Risciacqui intratoracici, peritoneali ed ostomici <p>Per la pulizia intraoperatoria e l'irrigazione di ferite superficiali. Inumidimento di bende e medicazioni. Durante i cambi di medicazione, per allentare bende incrostate o altre medicazioni incrostate. Per il trattamento locale della pelle e delle mucose nei processi infiammatori e infettivi. Per la prevenzione dell'infezione della mucosa e della pelle, ustioni e altri tipi di ferite.</p>

Specifiche						
Tipo di preparazione	Aspetto	Valore PH	Informazioni generali di sicurezza	Controindicazioni	Interazioni	Smaltimento
Soluzione chiara ed acquosa	Pronto all'utilizzo, fluido, soluzione chiara	Ø 8.5	Non mescolare con altri prodotti chimici o combinare con altri prodotti. Utilizzare solo pacchetti integri. Adatto solo per uso esterno. Prodotto medico - Tenere lontano dalla portata dei bambini!	Poiché non è mai possibile escludere allergie, le soluzioni per l'irrigazione delle ferite ActiMaris® o il gel per ferite ActiMaris® non devono essere utilizzate con allergie note o sospette a nessuno dei suoi ingredienti.	Non combinare con: - Altri prodotti per l'irrigazione delle ferite - Soluzioni contenenti argento, iodio o biguanide	Le soluzioni per l'irrigazione delle ferite ActiMaris® possono essere smaltite in un sistema standard di depurazione delle acque reflue.

Dimensioni				
Codice Articolo	Quantità di riempimento netta	Unità di imballaggio	GTIN (bottiglia)	Confezioni
30300	300 ml	1 pezzo	7649989411075	30 pezzi
31000	1000 ml	1 pezzo	7649989411136	10 pezzi

Composizione ed informazioni tecniche
Acqua, sale marino, ipoclorito di sodio. Soluzione limpida, incolore, alcalina e ipertonica con odore caratteristico; Contiene 3% di sale marino (Sal Maris), 0,04% NaOCl e HOCl (0,004%).

Norme speciali per lo stoccaggio
Conservazione: deve essere conservato a temperatura ambiente tra + 5 ° e + 25 ° C. Proteggere dalla luce solare diretta. Periodo di utilizzo: la durata è di 30 mesi. La data di scadenza è sulla confezione. Dopo aver aperto il prodotto, il periodo di tolleranza è di 3 mesi; chiudere sempre il prodotto dopo l'utilizzo.

ActiMaris AG
Sandgrube 29
9050 Appenzell
SWITZERLAND

Fon: +41 71 505 75 25
Fax: +41 71 505 75 24

www.actimaris.com
info@actimaris.com

ActiMaris AG



natural medical solutions

Data di scadenza	Classificazione	Direttiva EU 93/42	CE	Produttore
2,5 anni	Classe IIb	Annex II, Rule 4	CE 1250	ActiMaris AG Sandgrube 29 9050 Appenzell SWITZERLAND Fon: +41 71 505 75 25 Fax: +41 71 505 75 24 www.actimaris.com info@actimaris.com